

黄体形成ホルモンキット

ゴールドサインLH ワンステップタイプ

大切な日を**正確**に!!

5テスト

詳しくは添付文書をご確認の上ご使用ください。



色の濃淡で排卵日がわかりやすい!

スマートフォン用アプリ「QUEMA」をダウンロードして、動画で測定方法をご覧ください。

1 「QUEMA for Smartphone」アプリ
をダウンロードしてください。

2 アプリを起動して「**コード読取**」ボタンをクリックし、表紙または
中面の測定方法の**赤枠部分**に水平にかざしてください。



iPhoneの方はApp Storeで、
Androidの方はGooglePlay
(旧Android Market)で
【無料】「QUEMA」と検索してください。

※一部端末や環境によって本アプリをご利用いただけ
ない場合があります。

▶ 詳しくは下記のサイトをご覧ください

<http://www.quema.info/site/support.html>



【ご注意】

※誌面から5cm～15cmくらい離すと反応しやすくなります。※ピントが合うように少しずつ距離を調整してください。※明るい場所でご利用ください。

特 徴

1.色の濃淡でわかりやすい!

尿中LHの変化を色の濃淡でとらえます。色が濃くなったら排卵日が近づいている証拠です。

2.判定時間が短い!

判定までの待ち時間が約3分と短いのでとても便利です。

※判定時間は尿検体によってばらつきがあります。

3.判定結果保存用シート付き!

前回の判定結果と見比べられるので、排卵日が近づいていることが目に見えてよくわかります。

操作方法

- ①アルミラミネート袋を開封して診断力セットを取り出します。
(アルミラミネート袋は、使用直前まで開封しないでください。)

- ②採尿カップに採った検体尿を付属のスポイトで正確に印まで採り(0.6~0.7mL)、診断力セット中央のフィルター部分に加えます。

尿を落とす際は、一滴ずつではなく一度に全量を落としてください。

- ③検体尿が、完全に吸引されましたら、判定プレートを引き抜き判定します。



※「QUEMA」アプリをダウンロードして左図部分にかざしてください。


※詳細は表紙の説明をお読みください。

測定結果の判定法

本試薬のhLH検出感度は、20IU/Lです。尿中に20IU/L以上のhLHが存在するとき判定プレート上に赤紫色のスポットが肉眼で確認されます。hLH濃度が高ければより濃い着色のスポットが確認されます。

※本色見本は印刷ですので実際の着色と色調が異なる場合があります。目安としてご利用ください。

LHサージ模式図

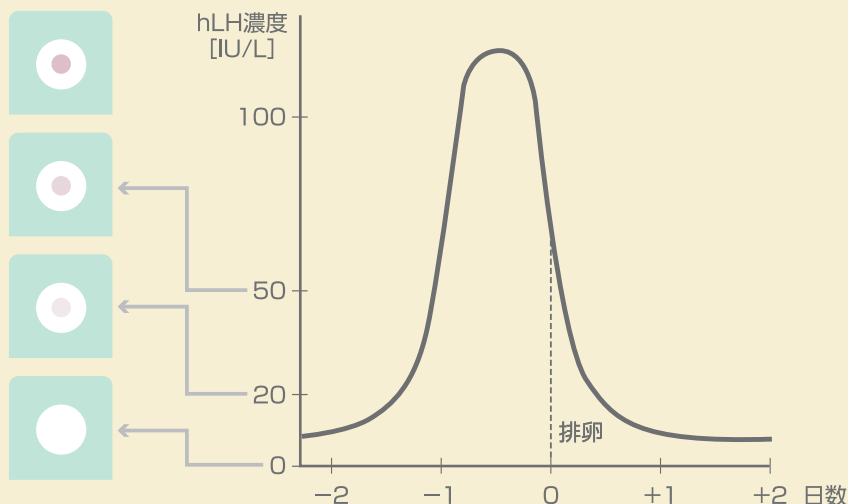

※スポットの濃さは個人差がありますので、毎日の判定結果を比較し、最も濃いスポットをLHサージと判定してください。

※LHサージから排卵までの時間は個人差がありますのでご注意ください。

結果の保存

1. この判定プレートは判定後に判定結果の保存ができます。
2. 判定プレートの裏の台紙をはがし、判定結果保存用シートにお貼りください。
3. 判定欄にはスポットが確認されたら+、確認されない場合は-とお書きください。

記入例

ゴールドサインLHワンステップタイプ《5テスト》判定結果保存用シート／氏名:

日付	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16
時間	7:30	8:00	7:30	7:40	7:20
月経周期	28日	28日	28日	28日	28日
判定結果					
判定	-	-	+	++	+

◎判定プレートの裏の台紙をはがし、枠内に貼付してください。

* スポットの赤紫色は金の粒子の色ですので、半永久的に色は変わりません。

検査開始日について

過去3回程度の月経周期についてその平均日数を求め、下表より開始日を決定してください。

※検査開始日は**月経開始日を1日目**として数えてください。

※月経周期のばらつきが大きい場合には、**最も短い周期を基準**に開始日を決定してください。

月経周期 (平均日数)	検査 開始日	月経周期 (平均日数)	検査 開始日	月経周期 (平均日数)	検査 開始日	月経周期 (平均日数)	検査 開始日
21	5日目	26	10日目	31	15日目	36	20日目
22	6日目	27	11日目	32	16日目	37	21日目
23	7日目	28	12日目	33	17日目	38	22日目
24	8日目	29	13日目	34	18日目	39	23日目
25	9日目	30	14日目	35	19日目	40	24日目

操作上の 注意

1. 採尿は検査期間中を通じ毎日同じ時刻に行ってください。
2. 尿は清潔な容器に採り、採尿後は速やかに検査してください。
3. 検査期間中は、水分の大量摂取を控えてください。
4. 血清、体液等は検体として用いないでください。

全般的な 注意

- ① 本試薬は、尿中のhLHの検出を目的とする体外診断用医薬品ですので、避妊など他の目的には、使用しないでください。
- ② 診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断を行ってください。
- ③ 添付文書に記載された以外の使用方法については保証できません。

使用上の 注意

- ① 本試薬は、操作手順に従い直射日光や熱源を避け、室内温度(20～30℃)で検査します。
- ② 使用期限を過ぎた試薬は、使用しないでください。
- ③ 診断カセットは、使用直前までアルミラミネート袋から取り出さないでください。
- ④ 付属の採尿用スポイトは、1検体ごとに新しいものを使用し、尿を正確に印まで採り、診断カセットに添加してください。
- ⑤ 検体尿を添加する前に、判定プレートを引き出した診断カセットは、使用できません。
- ⑥ 検体尿が診断カセットに吸収された後は、なるべく速やかに(5分以内)判定プレートを引き抜き、判定してください。

貯蔵方法・ 有効期間

1. 貯蔵方法

直射日光を避け、室温で保存してください。

2. 有効期間

24ヵ月(使用期限は外箱、アルミラミネート袋に表示)

構成試薬	5テスト分	付属品	5テスト分
診断カセット 抗ヒト黄体形成ホルモン(hLH)マウスモノクローナル 抗体で感作した金コロイド含有 1テスト分中 12mg	5枚	採尿用スポイト	5本
判定プレート(診断カセットに組み込まれています) 抗ヒト黄体形成ホルモン(hLH)マウスモノクローナル 抗体含有 1テスト分中 15μg	5枚	判定結果保存用シート (判定色見本付き)	1枚
		採尿カップ	5個



[問い合わせ先]

森永乳業株式会社 栄養食品事業部

〒108-8384 東京都港区芝5-33-1 TEL. 03 (3798) 0133

[ホームページ] <http://www.morinagamilk-goldsign.com/>

[製造販売元]



株式会社ニッポンジーン

富山市荒川1-1-22

[発売元]



森永乳業株式会社

東京都港区芝5-33-1

